

義歯用除菌洗浄剤

デントラスター・プロ

次亜塩素酸ナトリウム配合

きれいを守る3つの特長

① デンチャープラーク、
ステインを素早く分解・除去

② 義歯性口内炎や
口臭の原因菌を
強力に除菌

③ 金属材料にも
使える安心設計



洗浄前

しっかり除菌・洗浄・消臭!!




洗浄後



NET.2L
標準価格

7,200円 (税抜)

使用方法

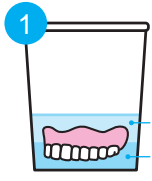

1 義歯、その他の洗浄物を
洗浄容器に採り、
本剤(2倍希釈液)を入れて下さい。
水: 1 ※汚れに応じて原液~3倍希釈で
本剤: 1 ※本剤は使用時に希釈して下さい。



2 洗浄容器を
超音波洗浄器に入れ、
5分間洗浄します。
※汚れの除去状態により
洗浄時間を調整して下さい
(最大30分間)。



3 洗浄液を捨てた後、容器に入れたまま
水で2~3回すすいで下さい。
その後、洗浄容器に新しい水を入れ、
約5分間超音波洗浄して下さい。
※洗浄液はアルカリ性ですので、
十分にすすいで下さい。

製品概要

用途: 義歯(アクリルレジン床、スルホン床、ノンクラスプ床)、金属床、
その他(クラウン、ブリッジ、リテーナー、スプリント、マウスガードなど)の除菌洗浄

成分: 次亜塩素酸ナトリウム(2%)、洗浄力強化剤、界面活性剤、防錆剤

液性: アルカリ性


使用上の注意

●使用時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。●本剤を
直接超音波洗浄器に入れて使用しないで下さい。●酸性製品とは絶対に
混ぜないで下さい。有害な塩素ガスが発生して危険です。●他の
製品と混ぜて使用しないで下さい。●用途以外には使用しないで
下さい。●金属を変色させることがあるため、本剤へ長時間浸漬しな
いで下さい。●アルミ製品には使用しないで下さい。●直射日光、
高温を避けた場所で保管して下さい。●子供の手の届かない所に
保管して下さい。●衣類を脱色するので液の付着に注意して下さい。

販売元

総販売元 **有限会社 デンタル・ウェーブ** 大阪市北区中崎西1-4-22
TEL.06(4802)6617

製造元 **アムテック株式会社**

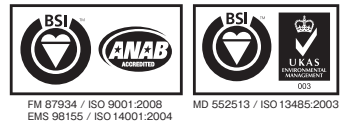



しっかり除菌・洗浄・消臭!!

株式会社 株式会社 株式会社