

義歯用除菌洗剤

デントラスター・プロ

次亜塩素酸ナトリウム配合

きれいを守る3つの特長

- ① デンチャープラーク、ステインを素早く分解・除去
- ② 義歯性口内炎や口臭の原因菌を強力に除菌
- ③ 金属材料にも使える安心設計



しっかり除菌・洗浄・消臭!!



NET.2L
標準価格
7,200円 (税抜)

使用方法

| | | |
|--|---|--|
| <p>1</p>  <p>義歯、その他の洗浄物を洗浄容器に採り、本剤(2倍希釈液)を入れて下さい。</p> <p>水: 1 ※汚れに応じて原液~3倍希釈で使用して下さい。 本剤: 1 ※本剤は使用時に希釈して下さい。</p> | <p>2</p>  <p>洗浄容器を超音波洗浄器に入れ、5分間洗浄します。</p> <p>※汚れの除去状態により洗浄時間を調整して下さい(最大30分間)。</p> | <p>3</p>  <p>洗浄液を捨てた後、容器に入れたまま水で2~3回すすいで下さい。その後、洗浄容器に新しい水を入れ、約5分間超音波洗浄して下さい。</p> <p>※洗浄液はアルカリ性ですので、十分にすすいで下さい。</p> |
|--|---|--|

製品概要

用途: 義歯(アクリルレジン床、スルホン床、ノンクラスプ床)、金属床、その他(クラウン、ブリッジ、リテーナー、スプリント、マウスガードなど)の除菌洗浄

成分: 次亜塩素酸ナトリウム(2%)、洗浄力強化剤、界面活性剤、防錆剤

液性: アルカリ性

使用上の注意

- 使用時は必ず保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。
- 本剤を直接超音波洗浄器に入れて使用しないで下さい。
- 酸性製品とは絶対に混ぜないで下さい。有害な塩素ガスが発生して危険です。
- 他の製品と混ぜて使用しないで下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 金属を変色させることがあるため、本剤へ長時間浸漬しないで下さい。
- アルミ製品には使用しないで下さい。
- 直射日光、高温を避けた場所で保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 衣類を脱色するので液の付着に注意して下さい。

販売元

総販売元 **有限会社 デンタル・ウェーブ** 大阪市北区中崎西1-4-22 TEL.06(4802)6617

製造元 **アムテック株式会社**



あなたの入れ歯は大丈夫ですか？

今、話題の「**歯科医院専用 義歯用除菌洗剤**」で
口臭の原因菌や汚れを、しっかり除菌・洗淨します

次亜塩素酸ナトリウム配合により

高い除菌・洗淨・消臭効果！

デンチャープラーク、ステイン(茶渋等の汚れ)を
短時間で除去！

洗淨前



洗淨後



しっかり除菌・洗淨・消臭！！

これを機会に、是非定期的なメンテナンスをお勧めします
詳しくはスタッフにご相談下さい